

INDICADOR QUÍMICO CIRCULAR TIPO 1 PARA VAPOR

Ref: 1736

Transição de cor

Fácil e simples
utilização



Sobre o produto

- ⇒ Indicador químico conforme **ISO 11140-1**.
- ⇒ **Monitora a exposição** de processos de esterilização de vapor.
- ⇒ **Transição de cor** para melhor visualização do processo.
- ⇒ Ótimo **custo benefício**.

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

ITEM#	EMBALAGEM
1736	ROLO COM 1000 UNIDADES




Descrição do Produto

Indicadores de processo para calor úmido (vapor) são fabricados para atender as especificações descritas na norma ANSI / AAMI / ISO 11140-1 para os Indicadores de Tipo 1.

Os indicadores químicos Tipo 1 Vapor não são destinados para utilização como indicadores de esterilidade, mas como indicadores do processo de transferência utilizado para monitorar a exposição de processos de esterilização de Vapor.

Use um indicador em cada item, embalagem, pacote ou bandeja que será processado. Processar os pacotes/itens conforme instruído no esterilizador.

Após a exposição ao vapor, o indicador passará de rosa para cocoa (marrom). A cor de transição pode variar dependendo da configuração da carga e as condições de exposição. Transição de cor consistente e irreversível quando armazenado protegido de luz e umidade (conforme descrito em armazenagem).

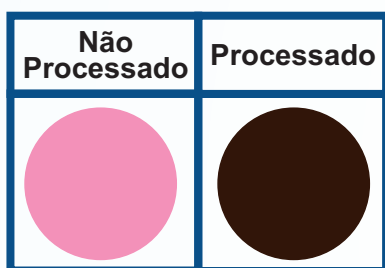

Obs: As cores mostradas são representações de tinta inicial e cores de sinal impressas, mas podem variar de uso real. A cor do sinal obtida a partir da exposição a vapor pode variar do exemplo acima devido a diferenças nos parâmetros de processamento (isto é, teor de carga, tempo de ciclo, temperatura, etc.). Para um Indicador de processo Tipo 1, qualquer alteração de cor produzida durante a exposição a diferente da cor inicial é considerada aceitável.

Conformidade

ISO 11140-1:2014 *Sterilization of health care products – Chemical Indicators- Part 1: General*

Características Físicas

Dimensões: Cada indicador possui um diâmetro de 11,15mm;


Conteúdo: Um rolo com 1000 unidades;

Identificação: Lote e data de validade estão impressos na parte interior do rolo.

Validade: 2 anos após a data de fabricação.

Livre de chumbo.

Armazenamento

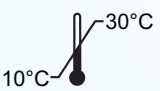 Temperatura: 10 °C a 30 °C.	 Umidade relativa: 30% a 80%.
 Mantenha em local seco, sem condensação.	 Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc.