

BOWIE & DICK - TIPO FOLHAS

Ref: 946 e 947

Avaliação de
penetração de vapor

Fácil utilização



Sobre o produto

- ⇒ O indicador químico conforme **ISO 11140-5**.
- ⇒ **Monitoramento** do sistema pré-vácuo.
- ⇒ **Mudança de coloração** para análise.
- ⇒ Ótimo **custo benefício**.

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

ITEM#	EMBALAGEM	BAR CODE
946	PACOTE COM 50 UND	7 898939 079777
947	PACOTE COM 100 UND	7 898939 079760



Descrição do Produto

O Bowie & Dick é uma folha teste de indicador impressa com tinta reativa na diagonal em um padrão de gravação cruzada e foi projetada para ser usada em um pacote de teste padrão AAMI Bowie & Dick. Este teste é usado para monitoramento diário em esterilizadores a vapor de alta temperatura/pré-vácuo. A folha de teste verifica a penetração de vapor e a ausência de bolsas de ar residuais antes de iniciar as operações de esterilização do dia.

Características do Produto

Folha indicador para uso em embalagem de teste padrão ou pacote de toalha para realização diária teste Bowie & Dick. Para utilização em esterilizadores pré-vácuo a 134 °C 3,5 minutos. Alteração de Azul para Marrom/Preto uniforme após o processamento.

Instruções de Uso

- 1- Prepare toalhas 100% de algodão recém lavadas (não passadas), dobradas em tamanho não menor que 23 centímetros por 30 centímetros. Coloque as toalhas uma sobre a outra, suficientes para atingir uma altura de 25 a 28 centímetros.
 - 2- Coloque uma folha de teste do Bowie & Dick geometricamente no centro do pacote de toalhas.
 - 3- Coloque o pacote de teste preparado em um único invólucro e prenda com fita adesiva.
 - 4- Coloque o pacote de teste em um esterilizador aquecido, horizontalmente (plano) em uma câmara vazia, sobre o dreno mais próximo da porta.
 - 5- Proceda como de costume, de acordo com as instruções do fabricante do esterilizador. Teste típico é um ciclo de 134 ° C por 3,5 minutos de tempo de exposição. Se a exposição de meio minuto não puder ser selecionada no esterilizador, pode ser usado um tempo de processo de 4 minutos.
- Não exceda 4 minutos ou o teste será considerado inválido.
- 6- Ao recuperar a folha de teste do indicador, insira a data, o número do esterilizador e as iniciais do operador. Arquive de acordo com o procedimento de retenção de registros.

Conformidade

ISO 11140 *Sterilization of health care products — Chemical indicators — Part 5: Class 2 indicators for Bowie and Dick type air removal tests.*

Características Físicas

Livre de chumbo.

Medidas: 215,9mm x 279,4mm

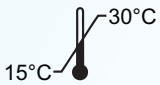
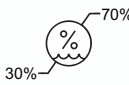
Identificação: Lote e data de validade estão impressos na folha de teste do pacote e na caixa.

Validade: 3 anos a partir da data de fabricação.

Produto fabricado por: Clean Up Brazil Biotecnologia Ltda.



Armazenamento

 Temperatura: 15 °C a 30 °C.	 Umidade relativa: 30% a 70%.
 Mantenha em local seco, sem condensação.	 Mantenha protegido de agentes esterilizantes, luzes solares, radiação, etc.

Avaliação

Teste: Teste Bowie & Dick não processado



Aprovado / Resultado Satisfatório: A folha de teste do indicador deve mostrar uma mudança uniforme de cor quando exposta aos parâmetros predeterminados de esterilização. Essa cor indica penetração de vapor, remoção de ar adequada e falta de vazamento de ar suficiente.



Resultado de falha / insatisfatório: Uma área de cor clara no meio da folha de teste marrom / preta indica que há uma bolsa de ar presente e falta de remoção de ar suficiente. Qualquer resultado que não seja aprovado, deve ser relatado a um responsável qualificado para análise e determinação final.

